



Photo non contractuelle

Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Notre version pad est particulièrement destinée à préparer la peau avant injection. Conditionné en boîte de 100 tampons prêts à l'emploi.

- Tampon de préparation de la peau avant injection
- Etui de 100 tampons prêts à l'emploi, pratiques, version économique



230600

230554

4154

4054

4254

24051

24055

24054

24059

24056

24057

24057

COMPOSITION : Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5%

MODE D'EMPLOI : Tampon imprégné permettant la désinfection des surfaces corporelles saines et des surfaces non alimentaires. Application pour 0,2m², à renouveler toutes les 6 heures si nécessaire. Usage unique. Usage externe.

PRÉCAUTIONS : Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. Ne pas utiliser pour un usage autre que pour lequel le produit est prévu.

RONT Production - Z.I. du Val d'Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil

Tél : +33 (0)1 39 80 12 12 - Fax : 01 39 80 99 33 - Mail : info@ront.com - Site internet : www.ront.com

PAD IMPRÉGNÉ D'ALCOOL 70%

(GB)

70% ALCOHOL PREP PAD

(NL)

PAD GEDRENKT IN ALCOHOL 70%

(E)

ALMOHADILLA HUMEDECIDA
CON ALCOHOL AL 70%

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Pad alcool (23055)
Colisage	Boîte de 100 sachets
Poids du colisage	9 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	40 * 29 * 29
Nb total de produit par palette	4000 boîtes de 100 pads
Poids total palette (hors palette)	360 kg
Dimension totale hors palette	120 * 160 * 80

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
230600	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
230554	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	186 mm	290 mm